

**Przeznaczenie:**

Używany z urządzeniami monitorującymi EKG do dostarczania ludzkiego sygnału bioelektrycznego i testowania EKG pacjenta.

**Konstrukcja:**

Składa się z odprowadzeń, kabla głównego i wtyczki.

**Sposób użycia:**

1. Wybierz kabel EKG i odprowadzenia pasujące do urządzenia i pacjenta w zależności od typu urządzenia.
2. Prawidłowo połącz odprowadzenia z kablem głównym i podłącz kabel główny do gniazda EKG urządzenia.
3. Podłącz odprowadzenia do odpowiedniego umiejscowienia elektrod zgodnie z poniższym oznaczeniem kolorystycznym

| 3 / 5-elektroda |        |          |       |         |       |          |         |       |        |
|-----------------|--------|----------|-------|---------|-------|----------|---------|-------|--------|
| AHA             |        |          |       |         | IEC   |          |         |       |        |
| RL              | LA     | LL       | RA    | V       | C     | R        | F       | L     | N      |
| zielony         | czarny | czerwony | biały | brązowy | biały | czerwony | zielony | żółty | czarny |

  

| 10-elektroda |         |        |          |          |                      |                   |                     |                       |                          |                       |
|--------------|---------|--------|----------|----------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| AHA          | RL      | LA     | LL       | RA       | V1                   | V2                | V3                  | V4                    | V5                       | V6                    |
|              | zielony | czarny | czerwony | biały    | brązowy/<br>czerwony | brązowy/<br>żółty | brązowy/<br>zielony | brązowy/<br>niebieski | brązowy/<br>pomarańczowy | brązowy/<br>fioletowy |
| IEC          | N       | L      | F        | R        | C1                   | C2                | C3                  | C4                    | C5                       | C6                    |
|              | czarny  | żółty  | zielony  | czerwony | biały/<br>czerwony   | biały/<br>żółty   | biały/<br>zielony   | biały/<br>brązowy     | biały/<br>czarny         | biały/<br>fioletowy   |

**Czyszczenie i dezynfekcja:**

1. Oczyszczyć kabel bawełną lub miękką szmatką zwilżoną wodą i pozostawić do wyschnięcia na powietrzu.
2. Użyć etanolu 70% lub izopropanolu 70% jako płynnych środków dezynfekujących, zdezynfekuj kabel za pomocą bawełny lub miękkiej szmatki zwilżonej jednym z zalecanych środków dezynfekujących. Po dezynfekcji należy wytrzeć środek dezynfekcyjny pozostawiony na kablu miękką ściereczką zwilżoną wodą i pozostawić do wyschnięcia na powietrzu.

**Przechowywanie:** Temperatura: -5°C-40°C      Wilgotność: 0%-85%      Atmosfera: 86Kpa-100Kpa

**Transport:** Użyć dostępnych środków transportu. Podczas transportu należy zabezpieczyć przed wygnieciem oraz deszczem lub śniegiem. Zabroniona jest mieszana wysyłka z produktem trującym, szkodliwym i zaprawą.

**Uwagi:** 1. Nieprawidłowe umieszczenie elektrod może spowodować niedokładny pomiar.  
2. Nigdy nie zanurzaj zespołu przewodów w wodzie lub środku dezynfekującym.

**Ostrzeżenia:** 1. Nie należy używać kabla i przewodu zasilającego podczas skanowania rezonansem magnetycznym (MRI).  
Prąd indukcyjny może spowodować oparzenia

2. Nie używaj ich do monitorowania EKG w przypadku uszkodzenia, zablokowania, pogorszenia jakości lub widocznego zanieczyszczenia.

3. Nigdy nie używaj przewodu bez zabezpieczenia przed defibrylacją do defibrylacji, chyba że monitor pacjenta posiada funkcję ograniczania prądu

4. Nie należy modyfikować tego produktu bez zgody producenta; W przypadku modyfikacji tego produktu należy przeprowadzić odpowiednią kontrolę i testy, aby zapewnić dalsze bezpieczne użytkowanie produktu.

**Przeciwwskazania: Nie****Dyspozycje:**

W przypadku wyrzucania akcesoriów należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami lub polityką szpitala. Nie wyrzucaj losowo.

**Informacje o symbolach:**

Należy zapoznać się z instrukcją obsługi



Bez lateksu



Odporny na defibrylację



Zgodne z wymogami MDR EU2017/745.



Numer LOT



Użyj do



**MedNet EC-Rep GmbH**

Borkstrasse 10, 48163 Münster, Niemcy

**Producent: XUZHOU MAICUFF TECHNOLOGY CO., LTD**

Adres: 8#-2-1106 Jinxiujiayuan, Jianguo West Road, Xuzhou City, Jiangsu Province, China

Tel: 0086-516-85908810

Fax: 0086-516-85908830

http://www.maicuff.com

E-mail: info@maicuff.com

