

Mankiety NIBP - instrukcja użytkowania

Przeznaczenie Mankiet NIBP jest używany z monitorem do pomiaru ciśnienia tętniczego pacjenta.

Budowa: Mankiet NIBP zawiera mankiet, pęcherz i przewód przedłużający. Przewód przedłużający może być pojedynczy lub podwójny. **Kod produktu:**

Specyfikacja		Kod produktu
Wielokrotnego użytku, bez pęcherza	Pojedynczy	M5301C,M5302C,M5303C,M5304C,M5304LC,M5305C,M5306C
	Podwójny	M5401C,M5402C,M5403C,M5404C,M5404LC,M5405C,M5406C
Jednorazowego użytku	Pojedynczy / podwójny	M5542C,M5543C,M5544C,M5545C,M5545LC,M5546C,M5547C M5642C,M5643C,M5644C,M5645C,M5645LC,M5646C,M5647C

Sposób użycia:

- Wybrać odpowiedni rozmiar mankieta w zależności od obwodu kończyny pacjenta i monitora.
- Patrz poniższy rysunek, aby przyłożyć stronę "This side to patient" (Tą stroną do pacjenta) na mankiecie do ramienia lub uda pacjenta.

Symbol “ ↓ ” lub “  ” na mankiecie znajdującym się nad tętnicą ramienną lub udową, owinać mankiet wokół ramienia lub uda.



- Podłącz mankiet do przewodu przedłużającego NIBP.

Data ważności: Trzy lata dla mankieta NIBP wielokrotnego użytku. Dwa lata dla jednorazowych mankietów NIBP

Czyszczenie i dezynfekcja (tylko w przypadku mankieta NIBP wielokrotnego użytku):

- W celu wyczyszczenia mankieta można przetrzeć wilgotną szmatką z łagodną wodą z mydłem.
- Mankiet można dezynfekować promieniami ultrafioletowymi.

Kiedy należy wymienić mankiet:

Jeśli mankiet jest uszkodzony, należy go wymienić w odpowiednim czasie. Jeśli monitor wykazuje nieszczelność, również należy go wymienić.

Wymagania dotyczące przechowywania:

Temperatura: -5°C-40°C Wilgotność: 0%-85% Atmosfera: 86Kpa-100Kpa

Transport:

Do transportu można użyć dostępnych środków transportu. Podczas transportu należy zapobiegać ekstruzji i deszczowi lub śniegowi. Zabronione jest przesyłanie mieszane z produktami trującymi, szkodliwymi i zaprawiającymi.

Uwaga:

Nieprawidłowe umieszczenie może spowodować niedokładny pomiar. Wielokrotne użycie u jednego pacjenta, wyrzucić po użyciu i nie używać u innych pacjentów.

Ostrzeżenia :

Nie należy zakładać mankieta na kończynę używaną do infuzji dożylnych lub pomiaru Spo2.

Przeciwwskazania: Nie

Informacje o symbolu na mankiecie lub etykiecie

 Patrz instrukcja obsługi	 Producent
 Mankiety nie zawierają naturalnej gumy lateksowej	 Unikalny identyfikator urządzenia
 Zastosowanie wielokrotne u jednego pacjenta	 Wielokrotnego użytku Nie wyrzucać
 Wyrób medyczny	 Autoryzowany przedstawiciel w Unii Europejskiej
 Mankiety są zgodne z wymogami rozporządzenia MDR UE 2017/745 (rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych).	



MedNet EC-Rep GmbH

Borkstrasse 10, 48163 Münster, Niemcy

Producent: Xuzhou Maicuff Technology Co.,Ltd.

Address: 8#-2-1106 Jinxiujiayuan, Jiangsu West Road, Xuzhou City, Jiangsu Province, China

Tel: 0086-516-85908810

Fax: 0086-516-85908830

<http://www.maicuff.com>

E-mail: info@maicuff.com