

Przeznaczenie:

Mankiet NIBP jest używany z ciśnieniomierzem do pomiaru ciśnienia tętniczego u pacjenta.

Struktura:

Mankiet NIBP składa się z mankietu, pęcherza i przewodu przedłużającego. Przewód przedłużający może być pojedynczy lub podwójny.

Model

M5101,M5102,M5103,M5104,M5104L,M5104XL,M5105,M5106,M5201,M5202,M5203,M5204,M5204L,M5204XL,M5205,M5206
M5111,M5112,M5113,M5114,M5114L,M5114XL,M5115,M5116,M5211,M5212,M5213,M5214,M5214L,M5214XL,M5215,M5216
M5121,M5122,M5123,M5124,M5124L,M5124XL,M5125,M5126,M5221,M5222,M5223,M5224,M5224L,M5224XL,M5225,M5226
M5133,M5133L,M5134,M5134L,M5135,M5233,M5233L,M5234,M5234L,M5235, M5153,M5154,M5155,M5253,M5254,M5255
M5141,M5142,M5143,M5144,M5145,M5146,M5241,M5242,M5243,M5244,M5245,M5246
M5301,M5302,M5303,M5304,M5304L,M5304XL,M5305,M5306,M5401,M5402,M5403,M5404,M5404L,M5404XL,M5405,M5406

Wskazówki dotyczące stosowania:

1. Wybierz prawidłowy rozmiar mankietu zgodnie z obwodem kończyny pacjenta i monitora.
2. Patrz rysunek poniżej, załóż stronę z napisem "This side to patient" na mankiecie do ramienia lub uda pacjenta i symbol „ ↓ ” lub „ ϕ ” na mankiecie, aby znajdował się nad tętnicą ramienną lub udową, owiń mankiet wokół ramienia lub uda.



3. Podłącz mankiet do przewodu NIBP.

Czyszczenie i dezynfekcja:

1. W celu czyszczenia mankietu można przetrzeć wilgotną ściereczką z łagodną wodą z mydłem.
2. Mankiet można dezynfekować za pomocą ultrafioletu.

Kiedy należy wymienić mankiet:

W przypadku uszkodzenia mankietu należy go wymienić w odpowiednim czasie. Jeśli monitor wykazuje wyciek, należy go również wymienić.

Wymagania przechowywania: Temperatura: -5°C-40°C Wilgotność: 0%-85% Atmosfera: 86Kpa-100Kpa

Transport:

Do transportu można wykorzystać dostępne środki transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć się przed wyciekaniem oraz deszczem lub śniegiem. Zabroniona jest wysyłka mieszana z produktami trującymi, szkodliwymi i zaprawami.

Uwaga: Nieprawidłowo umieszczony może spowodować niedokładny pomiar.

Ostrzeżenie: Nie zakładaj mankietu na kończynę, która ma być używana do infuzji dożylniej lub pomiaru SpO2.

Przeciwwskazania: nie

Informacje o symbolach na mankiecie

 Zapoznaj się z instrukcją.

 Mankiety nie zawierają naturalnej gumy lateksowej.

 Mankiety są zgodne z wymogami MDR EU2017/745 (rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych).



MedNet EC-Rep GmbH

Borkstrasse 10, 48163 Münster, Niemcy

Producent: XUZHOU MAICUFF TECHNOLOGY CO., LTD

Address: 8#-2-1106 Jinxiujiayuan, Jianguo West Road, Xuzhou City, Jiangsu Province, China

Tel: 0086-516-85908810

Fax: 0086-516-85908830

<http://www.maicuff.com>

E-mail: info@maicuff.com