

# Przewody przedłużające NIBP-Instrukcja użytkowania

IFU-NAH/2025-01 Ver. A.2

## Wskazania i konstrukcja

W zestaw przewodów przedłużających NIBP wchodzi przewody i konektory. Dopasowane do mankietu NIBP, przewody przedłużające są przeznaczone do użytku przez lub pod nadzorem licencjonowanego lekarza lub innego pracownika służby zdrowia w celu nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi u noworodków, dzieci i dorosłych.

## Instrukcja użytkowania

1. Wybrać odpowiedni przewód przedłużający NIBP zgodnie z wyposażeniem monitora
2. Wybierz odpowiedni przewód przedłużający NIBP w zależności od pacjenta; noworodka lub niemowlęcia użyj przewodu noworodkowego, dla pacjenta pediatrycznego lub dorosłego - wybierz przewód przeznaczony do użytku dla osoby dorosłej
3. Podłącz jeden koniec przewodu przedłużającego do gniazda monitora, a drugi koniec do mankietu NIBP

## Ostrzeżenia

1. Mankiety dla noworodków i niemowląt należy używać wyłącznie z przewodami przeznaczonymi dla noworodków.
2. Mankiety pediatryczne i dla dorosłych należy używać wyłącznie z przewodami przeznaczonymi dla dorosłych.
3. Przewody nie są przeznaczone do sterylizacji. Nie sterylizować w autoklawie.
4. Należy zapobiegać przedostaniu się płynów czyszczących/dezynfekujących do przewodu. Płyny mogą uszkodzić sprzęt monitorujący.

## Czyszczenie i dezynfekcja

1. Przewody powietrzne należy przecierać wilgotną tkaniną z dodatkiem wody z łagodnym mydłem. Można je dezynfekować alkoholem izopropylowym, nadtlenkiem wodoru i podchlorynem sodu.
2. Po czyszczeniu/dezynfekcji należy przetrzeć przewody powietrza czystą wodą, aby usunąć wszelkie pozostałości.
3. Przed użyciem należy się upewnić, że przewody powietrzne całkowicie wyschły.

## Definicja symboli



Producent



Nie zawiera lateksu



Nie zawiera lateksu



Zgodność z wymogami MDR UE 2017/745



Wyrób medyczny



**MedNet EC-Rep GmbH**

Borkstrasse 10, 48163 Münster, Germany

## Producent: Xuzhou Maicuff Technology Co., Ltd.

Adres: 8#-2-1106 Jinxiujiayuan, Jianguo West Road, 221006 Xuzhou City,  
Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel: 0086-516-85908810

Fax: 0086-516-85908830

<http://www.maicuff.com>

E-mail: [info@maicuff.com](mailto:info@maicuff.com)

**maicuff**